


Euronda[®]



Cerrahi aletlerin yıkanması için Yıkama Dezenfektörü

Temizleme aşamasından itibaren validasyon ve izlenebilirlik

Kliniğiniz ister büyük ister küçük olsun, sterilizasyon işleminin doğru şekilde yapılması çok önemlidir. Bu, hassas faaliyetlerde görevli personeli de içeren mutlak doğrulukla tamamlanması gereken temel bir faaliyettir.

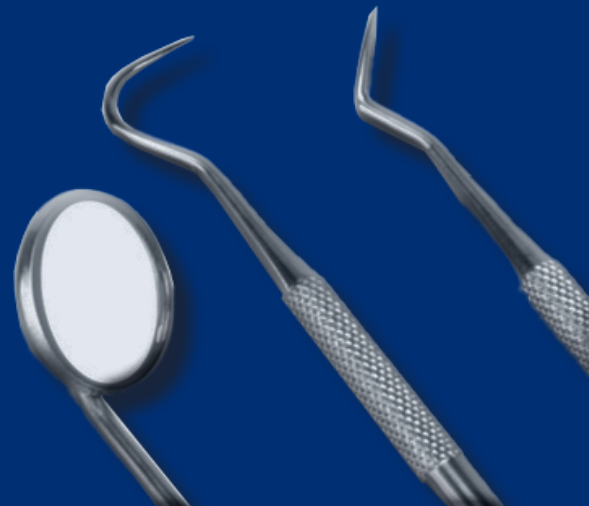

Gerçekten de, uygun şekilde yürütülen bir sterilizasyon protokolü üç yaşamsal aşamaya bölünmelidir: validasyon, izlenebilirlik ve geri alınabilirlik. Geri alınabilirlik, şüpheli hastalara dental muayeneden sonra aletlerin sterilizasyonu hakkında kanıt sunmak için önemli bir adım olmakla birlikte, izlenebilirlik, herhangi bir işlemde önce ve aletler hastalar için kullanılmadan önce vazgeçilmez bir aşamadır. Ancak bu temel aşamaların her ikisi de yalnızca süreç validasyonuna dayanmaktadır ve şimdi üzerinde durmak istediğimiz konu budur.

Sterilizasyon protokolü sırasında yeterli validasyon ve izlenebilirlik, ancak çeşitli aşamalar (aletlerin temizliğinden itibaren) standartlaştırılmışsa elde edilebilir.

Cerrahi aletlerin yıkanması elle mi yapılmalı yoksa otomatik mi olmalı?

Günümüzde, aletlerin temizliği birçok durumda manuel olarak yapılmaktadır. Dişhekimlerinin asistanları bu aşamaya çok aşinadır, çünkü klinikte sterilizasyon işlemini gerçekleştirenler onlardır. Kişisel Koruyucu Ekipman giymenin ne kadar önemli olduğunu biliyorlar ve çeşitli ön yıkama, yıkama, durulama ve kurutma aşamalarına aşinadılar.

Ayrıca, bu aşamaların ne kadar zaman aldığını iyi bilirler ve hata faktörünün hem operasyonel güvenlik hem de iş doğruluğu açısından her zaman pusuda beklediğinin farkındadırlar. Aslında, süreç otomatikleştirilmediğinde, hata payı çok yüksektir. Yine de küçük (insani ve anlaşılabilir) bir hata, sterilizasyon işleminin diğer tüm aşamalarını geçersiz kılabilir.

Yıkama aşaması sırasında bir aletin kısmen kirli kalması veya kurutma aşamasında küçük bir damla suyun düzgün bir şekilde kurutulmaması durumunda sonuçları hayal edebilirsiniz.

Bütün bunlar sterilizasyon adımını olumsuz etkileyecektir, en önemlisi aletler hastalar için kullanıldığında ciddi bir risk oluşturacaktır.

Ayrıca, hafife alınmaması gereken bir husus daha var: dişhekimleri asistanları aslında iş aletlerini yıkama için ne kadar zaman harcıyor? Bu zamanı, müşteri hizmetleri; hastaların klinikte ağırlanması ve prosedürleri açıklama gibi diğer faydalı faaliyetlere ayırabilirler. Personelin dikkatsizlikleri nedeniyle değil, insan hatasının tamamen doğal marjları nedeniyle geçersiz kılınma riski taşıyan bir sürece bağlı kalmaya gerçekten değer mi?

Eurosafe 60, sterilizasyon süreci için ihtiyaçlarınızın cevabıdır. Bu Euronda ürünü standartları yükseltir, validasyon sağlar ve özellikle zaman kazandırır. Ne kadar çok bilersen, o kadar çok seversin.


Eurosafe 60

Yepyeni bir dünya açan termal dezenfektör

Eurosafe 60, ön yıkama, yıkama, durulama ve kurutmayı tek bir döngüde tamamlayan, böylece manuel temizlik ihtiyacını ortadan kaldıran, hızlı olağanüstü sonuçlar veren ve diş hekimi için riskleri azaltan bir termal dezenfektördür. 60 adı, sadece neşterleri, bıçakları veya frezleri termal olarak dezenfekte etmenizi değil, aynı zamanda diş el aletleri, oynar aletler ve kapları da termal olarak dezenfekte etmenizi sağlayan geniş 60 litrelik tanktan gelir. Sıcak hava kurutma sistemi, içi boşluklu olanlar da dahil olmak üzere nesnelere içinde veya dışında kalan su damlacıklarının tamamen giderilmesini sağlar.

Asistan için ne gibi faydaları var?

Eurosafe 60, kullanıcının tercih edilen 3 yıkama döngüsünü ayarlamasına ve 40'a kadar programlamaya imkan tanır: 40 yıkama döngüsünün 20'si varsayılan moddur ve 20'si şifre koruma seçeneği ile sağlık personeli tarafından ayarlanabilir. Eurosafe 60, her biri kendi kişisel erişim koduna sahip 30 farklı personel tarafından kullanılabilir. Kullanışlı bir USB bağlantı noktası, verilerin ve geçmiş yıkama işlemlerinin bir kaydının sistemden dışarı aktarılmasını sağlar: bu, sterilizasyon protokolünün izlenebilirlik ve geri alınabilirlik yönleri için gereklidir.

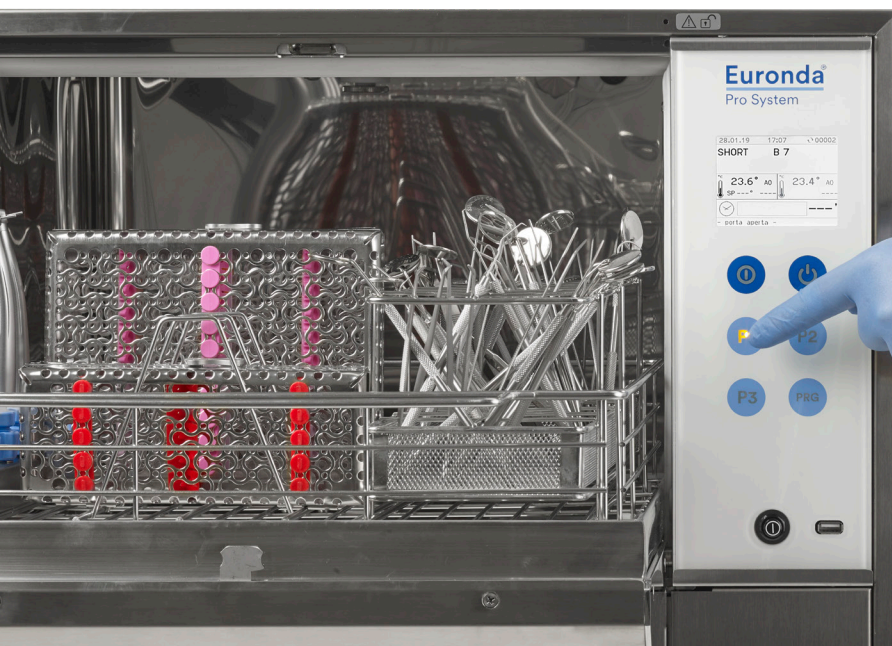

Zamandan ve paradan tasarruf edin

Sterilizasyon sürecinin validasyonu hiç şüphesiz büyük önem taşımaktadır, ancak para tasarrufu ikincil bir husus değildir. Eurosafe 60, gereken deterjan miktarını bile azaltarak maliyetleri düşük tutmanızı sağlar: 20 yıkama döngüsünü karşılamak için yaklaşık 30 litre yeterlidir. Dahası, dezenfektan aslında gereksizdir, çünkü dezenfeksiyona yol açan yüksek sıcaklıktır. Deterjan tankı cihazın içine yerleştirilmiştir, böylece personel tarafından kontaminasyon riski azalır.

Yıkama döngüsü kapasitesine gelince, kompakt tasarımına rağmen Eurosafe 60 son derece geniştir ve bir tam yük iki otoklavın eşdeğeri.

Validasyon, izlenebilirlik ve geri alınabilirlik

Bu makalenin başında, sterilizasyon protokolünde izlenebilirlik ve geri alınabilirliğin öneminden bahsettik. Tüm sürecin geçerliliğinin eşlik ettiği iki temel adım. Eurosafe 60 eksiksiz bir veri raporu sağlar: cihazı programlamaktan sorumlu personelden, sıcaklıkların ve yıkama döngülerinin tam dökümüne kadar. Bu verilere, bir bilgisayara indirmek için USB bağlantı noktası üzerinden veya Eurosafe 60 yıkama dezenfektörüne bağlı isteğe bağlı yazıcıya hemen yazdırılarak erişilebilir.



Diş hekimi asistanları ve hastalar için tam güvenlik

Daha önce elle gerçekleştirilen işlemler, artık Eurosafe 60 ile daha iyi yapılabilir - otomatik bir mekanizma ile daha güvenli, ve etkili bir şekilde. İşte, bu, personelinizin diğer işlere odaklanmasını sağlayacak, yıkama dezenfektöründe bulunan muazzam avantajları özetliyor.

Validasyon, izlenebilirlik ve geri alınabilirlik

Bunu bir düşünün. Eurosafe 60 döngüsü başladığında, klink personeli bekleme odasındaki hastaları görebilir, hesapları bitirebilir, randevu çizelgesini hazırlayabilir veya muayeneden sonra nasıl hissettiklerini öğrenmek için hastaları arayabilir. Bu arada Eurosafe 60, her bir aşamada sekmeleri tutarken ve tüm hastalar için sertifikalı koruma standartları sunarken, tüm ön yıkama, yıkama, durulama ve kurutma aşamalarını doğru ve verimli bir şekilde tamamlayarak arka planda yoğun bir şekilde çalışacaktır.

